はじめに

本アプリケーション vocaco (スケジュール機能付きVOCAアプリ) は、iPhone, iPad上で動作するVOCAの機能、単語を使って文章を作成する機能、スケジュールの表示・削除機能を兼ね揃えております。

【おすすめ】

- ・ボイスパネルでは、ボタンを押して音声を出すことや自分の伝えたいことを作成・追加することができます
- ・メッセージボードは、先生や友達と絵カード等でコミュニケーションを行っている児童・生徒向きです
- ・見通しがあると主体的に活動に参加できる児童・生徒向きです。「項目の並び替え、削除、追加」は支援者が 操作を行うという前提で作っていますが、個々に応じた方法で行ってください

【そのほかの特徴】

- ・絵カードの表示枚数は1ページあたり25枚、登録可能枚数は1000枚
- ・文章構成を考えるため、国語の教材としても利用可能
- ・校外学習など外出する際に容易に持ち運び可能
- ・絵カード、スケジュールがその場で作成可能(最大登録件数50件)
- ・作成画面が大きくて見やすい
- ・AirDropで絵カードを共有可能
- ・無料版もリリース
 - 1 絵カードの表示枚数は1ページ4枚まで
 - 2 登録可能枚数は8枚まで
 - 3 スケジュール表示数2件まで
 - 4 操作方法は変更なし

目 次 機能概要 • • • • • • • • • 4 ボイスパネル 5 • 削除 • • • • • • • • 5 • 追加 • • • • • • • • • • 6 メッセージボード ・文章の作成方法 • • • • • • • • • 7 ・文章の修正 • • • • • • • • • 8 スケジュール • スケジュール一覧 • • • • • • • • • 9 作成 •••••10 編集 • • • • • • • • • 1 0 スケジュール名の変更 • • • • • • • • • • 1 1 並び替え • • • • • • • • • • 1 1 削除 • • • • • • • • • 1 2 各スケジュール $\cdots \cdots 13 \sim 14$ スケジュール項目の編集 • • • • • • • • • 1 4 追加 • • • • • • • • • • 1 4 並び替え • • • • • • • • • 1 5 削除 • • • • • • • • • 1 5 絵カード管理画面 • • • • • • • • • • 1 6 修正 • • • • • • • • • 1 6 絵、写真の修正 $\cdots \cdots 17 \sim 18$ • • • • • • • • • 1 9 文字の修正 音声の修正 • • • • • • • • • • 2 0 編集(削除) · · · · · · · · · · · · 2 1 • 新規作成 • • • • • • • • • • 2 2 絵、写真の作成 $\cdots \cdots 23 \sim 24$ • • • • • • • • • • 2 5 文字の入力 録音 AirDrop • • • • • • • • • • 2 7 参考資料・iPadにおける基本操作 • • • • • • • • • 2 8

商標および著作権に関して

- Apple、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の、 米国、日本およびその他の国における登録商標 または商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに関します第三者の知的財産権、およびその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではございません。従いまして、上記第三者の知的財産権の侵害の責任、又は、これらの製品の使用により発生する責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。弊社では、お客 様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

共通項目

このマニュアル上では下記のように表現しています。

【 】・・・・ボタン名

「 」・・・・画面名



・・・ 絵カード



お湯を沸かす



・・・行動 (スケジュールで使用)

『機能概要』

本アプリは4つの機能に分かれており、アプリを開くと前回終了時の状況で画面が復元されます。

A ボイスパネル



表示されている絵カードをタップすると音声が再 生されます。

C スケジュール




スケジュールの一覧が表示されます。各スケジュールが表示され、追加、削除、並び替えも可能です。

B メッセージボード



表示されている絵カードを使って、文章を作成できます。【再生】ボタンをタップすると、作成した文章の音声が再生されます。

D 絵カード管理画面

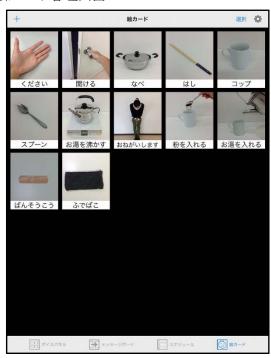

すべての絵カードが閲覧でき、絵カードの作成・編 集・削除ができます。

A『ボイスパネル』



絵カードをタップすると音声が再生されます。


<削除>

【編集】をタップすると削除マークが表示され、削除マークをタップするとその絵カードは削除されます。 また、【完了】をタップするとボイスパネル画面に戻ります。



<追加>

【追加】をタップすると、追加画面が表示されます。追加したい絵・写真をタップし、【完了】をタップします。

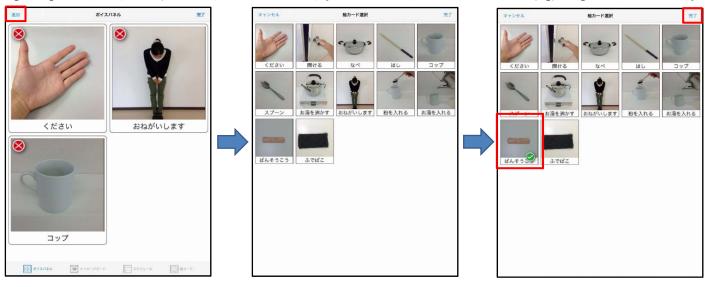

【完了】をタップすると、ボイスパネル画面に表示されます。



B『メッセージボード』




- ① 表示されている絵カードを使って、文章作成ができます。
- ② 再生ボタンをタップすると、作成した文章の音声が左から順に再生されます。

- 再生ボタン

<文章の作成方法>

絵カードをタップすると、自動的に下のバーにタップされた順番で左側から並びます。

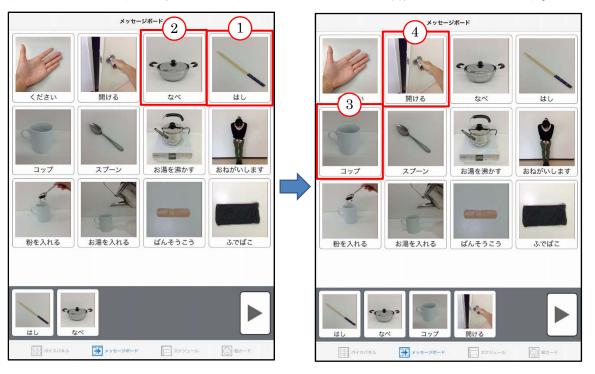

<文章の修正>

文章の作成中に間違えた絵カードをタップした場合は、下に表示されている絵カードをタップすると、消去されます。



文章作成後に文章を修正したい場合は、間違えた絵カードから一つずつ消去した後に、再度入れ直す必要があります。



※消去した絵カードの右側にカードがあると、左に移動します。

C『スケジュール』



スケジュールの一覧が表示されます。各スケジュールが表示され、追加、削除、並び替えも可能です。

各スケジュールをタップすると、一定時間内のスケジュールが表示されます。 各行動をタップすると音声が再生されます。



<スケジュールの作成>

" + "をタップすると、スケジュール作成画面が表示されます。

スケジュール名を入力し、【保存】をタップするとスケジュールが追加されます。



<スケジュールの編集>

【編集】をタップすると、スケジュール名の変更・並び替え・削除ができます。



≪スケジュール名の変更≫

項目をタップすると「スケジュール編集」が表示され、スケジュール名の変更ができます。



≪並び替え≫

各スケジュールの右側に表示されている "〓"を、指でドラッグし、移動させたい順へ移動します。



≪削除≫

表示されている" 👛"をタップすると、【削除】が表示され、【削除】をタップすると項目が削除されます。



<各スケジュール>

一定時間内のスケジュールが表示され、各行動をタップすると音声が再生されます。



終了した行動には絵・写真をタップすると、チェックマークが表示されます。 再度タップすると、チェックマークを消すことができます。



終了した行動を削除することができます。

左にフリックすると、【削除】が表示され【削除】をタップすると削除されます。



〈編集〉

【編集】をタップすると、スケジュール項目の追加・並び替え・削除ができます。




≪追加≫

【追加】をタップすると追加画面が表示されます。

追加画面内の絵・写真をタップして選択すると、チェックマークが入ります。(複数選択可)

【完了】をタップするとスケジュール項目画面に表示されます。

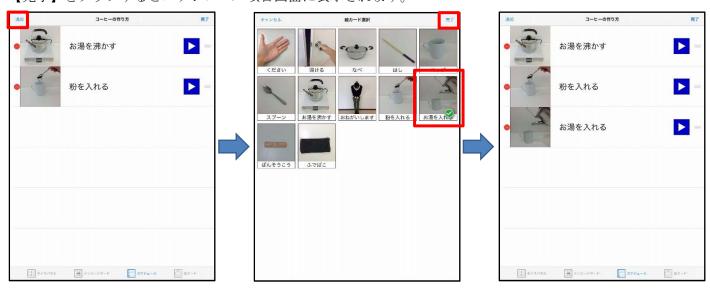

≪並び替え≫

各行動の右側に表示されている "■"をドラッグし、移動させたい順へ移動します。



≪削除≫

各行動の左側に表示されている"〓"をタップし、【削除】をタップするとその行動が削除されます。





D『絵カード管理画面』



作成済みの絵カードが一覧表示されます。 絵カードの修正、削除、新規作成ができます。

<修正>

絵・写真をタップすると「絵カードの修正」へ移動します。



≪絵・写真の修正≫


絵・写真をタップし、【写真を撮る】・【画像を選ぶ】のどちらかを選択します。




写真を撮影する場合は、【写真を撮る】をタップします。



撮影が終了したら、【写真を使用】と【再撮影】が表示されます。使用する場合は【写真を使用】、再撮影する場合は【再撮影】をタップします。【写真を使用】をタップすると「絵カードの修正」に戻ります。

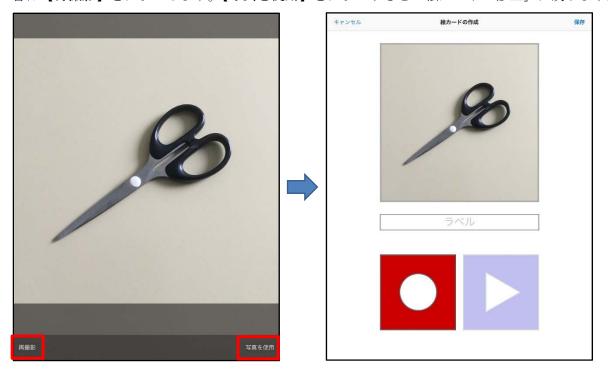

すでに撮影済みの写真を使用する場合は、【画像を選ぶ】をタップし、写真を選択し、【使用】をタップします。

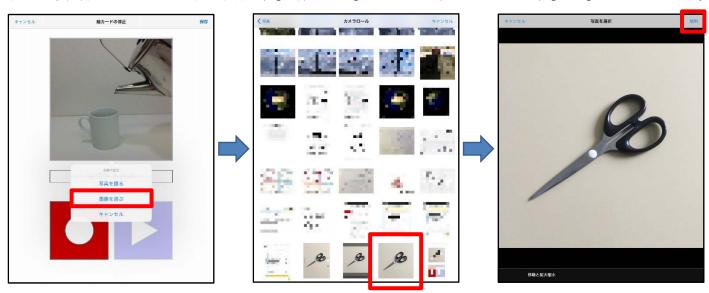


≪文字の修正≫

文字の表示されている入力欄をタップすると、キーボードが表示されますので、必要な文字を入力します。




入力が終了したら、【完了】をタップします。

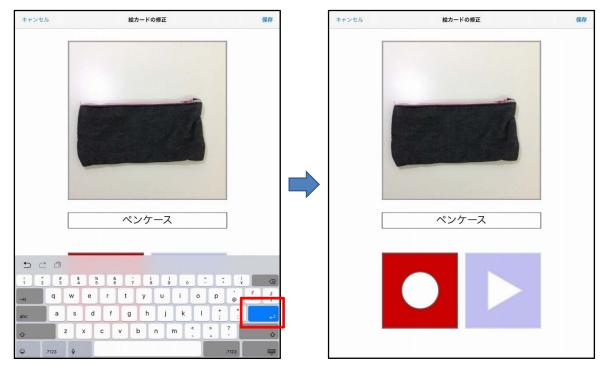

≪音声の修正≫

録音ボタンをタップすると録音が開始され、停止ボタンをタップすると録音が終了します。 録音終了後、再生ボタンをタップすると、録音された音声の再生ができます。

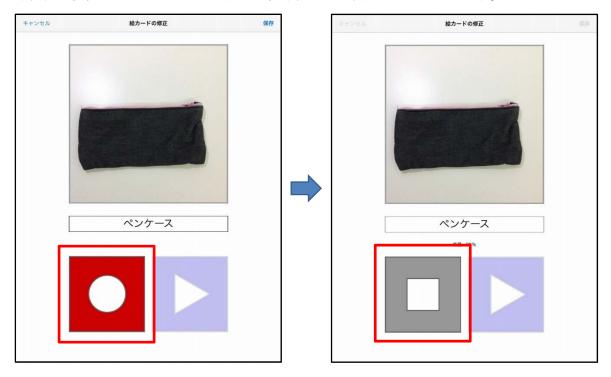

修正が終了したら、【保存】をタップします。「絵カード」に戻ります。




<編集(削除)>

「絵カード」で【選択】をタップし、削除したい絵カードをタップします。



ゴミ箱マークをタップし、【削除】をタップします。

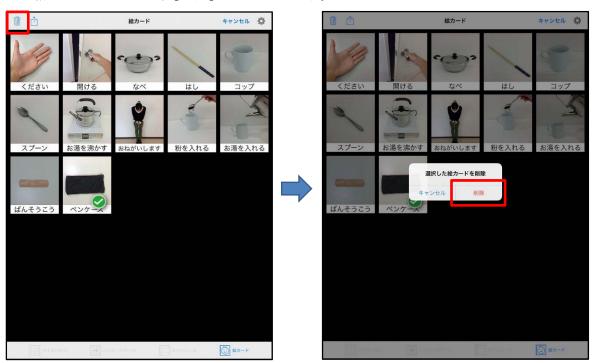


<新規作成>


"十"をタップします。



「絵カード作成」が表示されます。

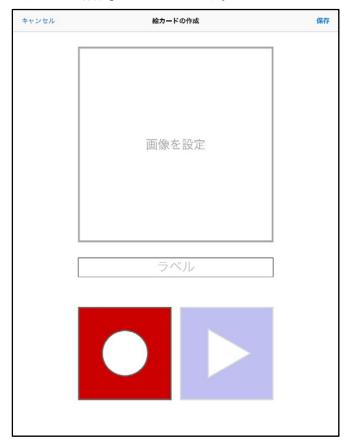


画像を設定の部分をタップし、【写真を撮る】・【画像を選ぶ】のどちらかを選択します。

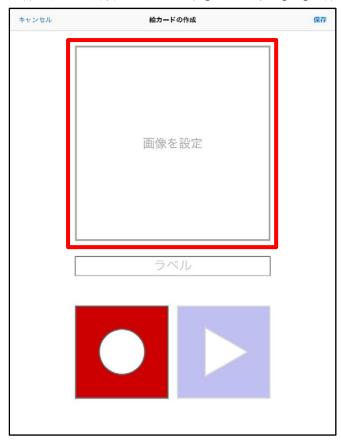


写真を撮影する場合は、【写真を撮る】をタップします。



撮影が終了したら、【写真を使用】と【再撮影】ボタンが表示されます。使用する場合は【写真を使用】を、再撮影する場合は【再撮影】をタップしてカメラを起動させます。【写真を使用】をタップすると「絵カードの作成」に戻ります。

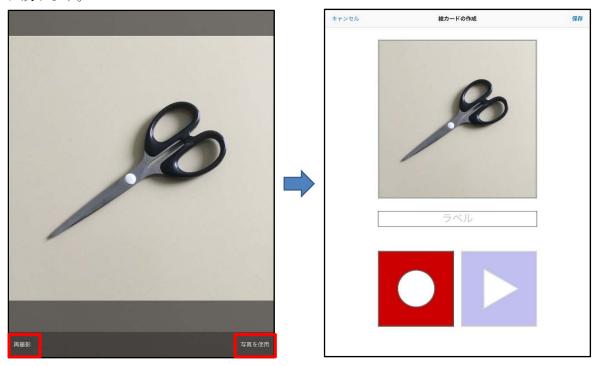


すでに撮影済みの写真を使用する場合は、【画像を選ぶ】をタップします。 写真のフォルダ一覧が表示されますので使用したい写真を選択し、【使用】をタップします。

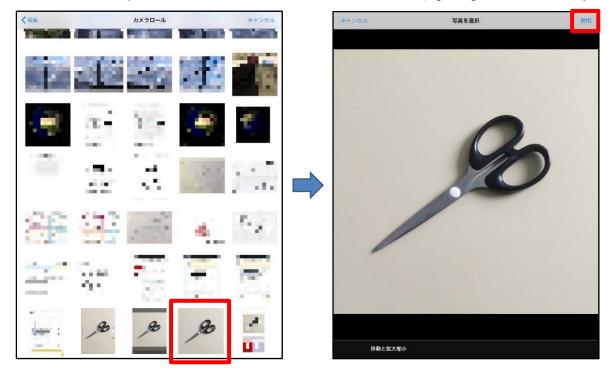


≪文字の入力≫

入力欄をタップすると、キーボードが表示されますので、絵カード名を入力します。

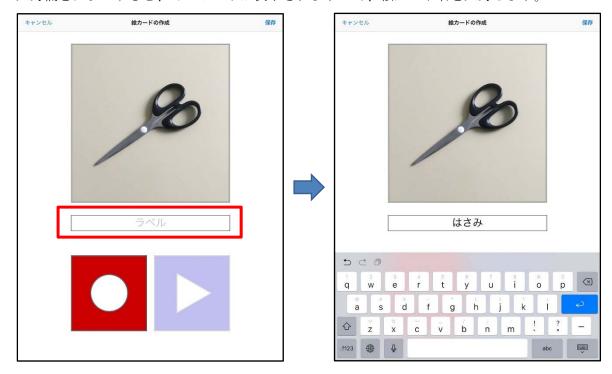

≪録音≫

録音ボタンをタップすると録音が開始され、停止ボタンをタップすると録音が終了します。 録音終了後、再生ボタンをタップすると、録音された音声の再生ができます

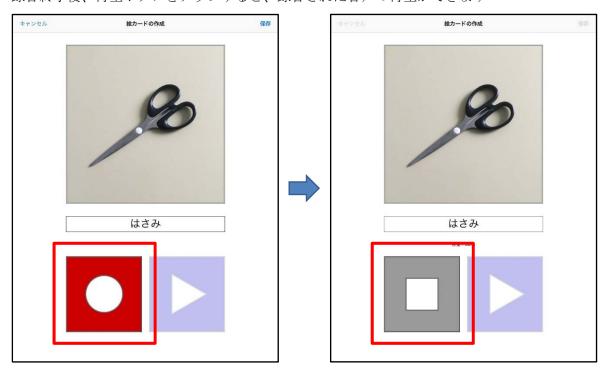


編集が終了したら、【保存】をタップします。




<絵カードの共有>

作成した絵カードは AirDrop で他のデバイスと共有することができます。

「絵カード」で【選択】をタップし、共有したい絵カードをタップします。

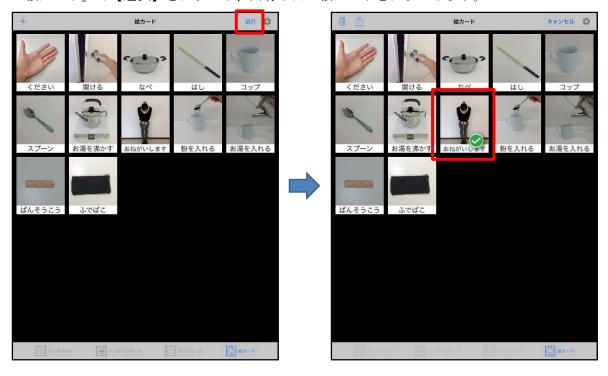

共有ボタンをタップし、共有先をタップします。

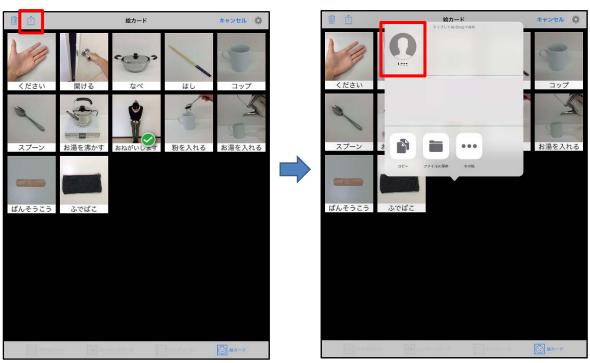

※共有先が表示されない場合は両方のデバイスの AirDrop がオンになっていることを確認してください。

<参考資料>

iPad における基本操作


タッチパネルの基本操作

iPad は2本以上の指で操作が可能です。操作方法には、独特の呼び名が使用されます。



タップ/ダブルタップ

タップとは、画面上を指先で軽くたたく動作です。アプリの起動などの操作が行えます。また2回軽くたたく動作をダブルタップと呼びます。画面の拡大が可能です。

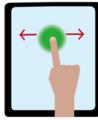

ドラッグ/フリック

ドラッグは、画面に指をつけたまま上下左右に動かす動作です。画像、写真などの位置を移動するときに使います。フリックは、指の腹で画面上をはじくような動作です。写真やwebページをスクロール(画面を上下に動かすこと)させる際に使います。



ピンチイン/ピンチアウト

二本の指で画面をつまむような動作をピンチイン、反対に二本の指を広げる動作とピンチアウトを呼びます。ピンチインは写真やwebページな縮小表示させ、ピンチアウトは拡大表示させます。